




The one that works.

Crystal Tip® – Einwegspitzen für Luft/Wasser-Spritzen

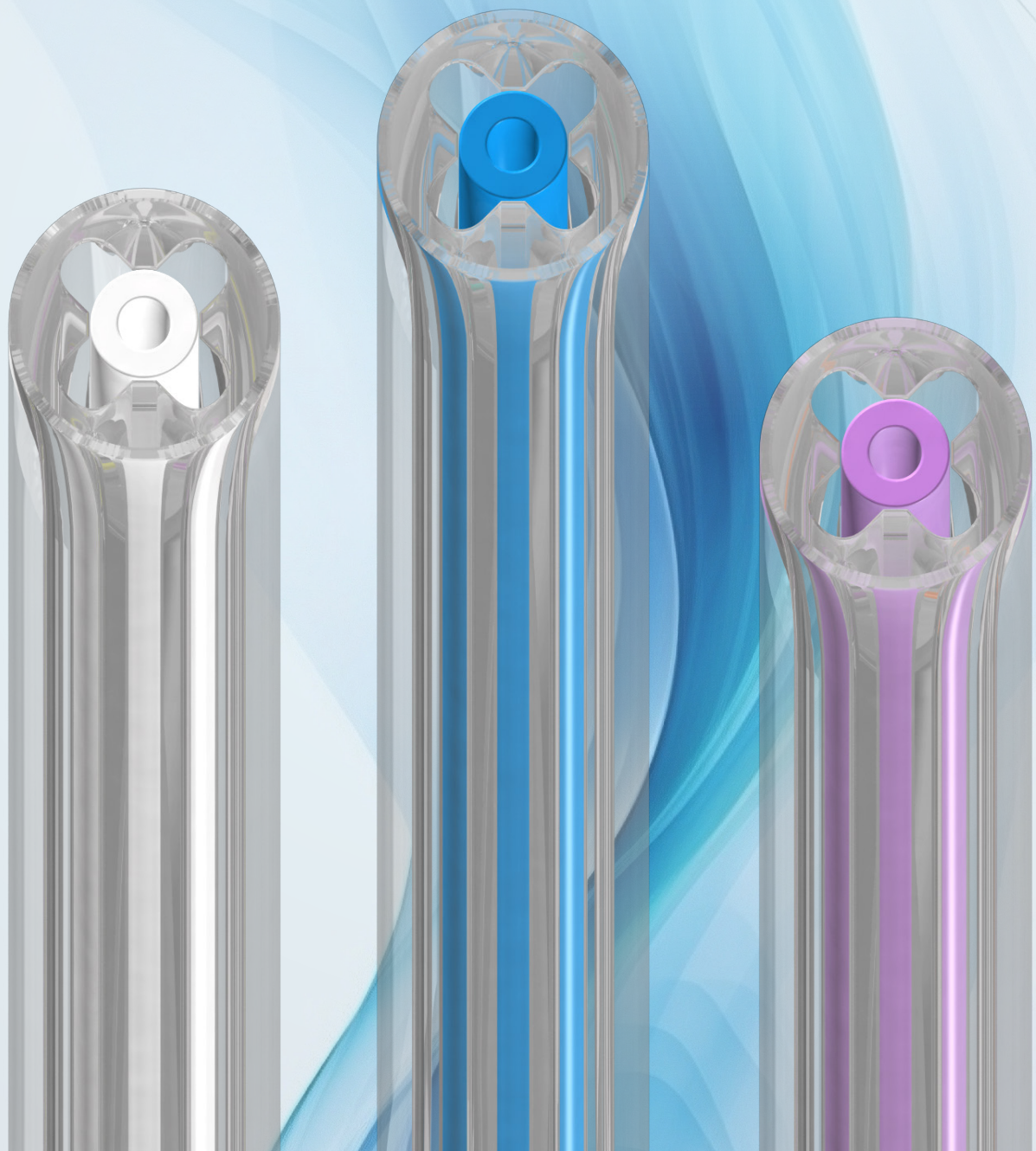



Wir unterstützen Sie bei der korrekten Bestimmung Ihrer Spritze, senden Ihnen ein Probemuster, erstellen für Sie einen Vergleich zwischen Crystal Tip® und Konkurrenzprodukten* und liefern Ihnen das passende Umrüstungsset (falls erforderlich), um den Wechsel für Sie so reibungslos und einfach wie möglich zu gestalten.

*siehe QR-Code auf der letzten Seite dieses Flyer

			
Umrüstungs Set Cefla Anthos F3/F6 QRNT1030	Umrüstungs Set Cefla SP QRNT1035	Umrüstungs Set Faro SM03 QRNT1100	Umrüstungs Set Kavo Estetica QRNT1092
			
Umrüstungs Set Kavo K4 QRNT1090	Umrüstungs Set Luzzani Minibright QRNT1055	Umrüstungs Set Luzzani Minilight QRNT1050	Umrüstungs Set Luzzani Minimate QRNT1051
			Die Artikelnummern beziehen sich nur auf die Crystal Tip® Adapter
Umrüstungs Set Quick Release ADEC/UNIC QRNT1000	Umrüstungs Set Sirona Sprayvit 4000 QRNT1071	Umrüstungs Set Sirona Sprayvit C8 QRNT1070	

Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen rund um Crystal Tip®. Unser Ziel ist es, Ihnen alle wichtigen Informationen schnell und übersichtlich bereitzustellen. Sollten Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

01. Was ist der Vorteil der „Quad Air Core“ Technologie?

Die vier Luftkammern sorgen für moderaten Druck und Zerstäubung. Dadurch ist der Aufsatz besonders zum Trocknen von Adhäsiven, Sealants u.a. geeignet. Der Originalaufsatz (Quad Air Core) ermöglicht ebenfalls einen guten Zugang im hinteren Molarenbereich. Der längere Aufsatz (95 mm) lässt sich für schwer zugängliche bukkale oder linguale Behandlungen biegen.

02. Was ist die Besonderheit beim HP-Aufsatz?

Mit seiner Länge von 65 mm und den Doppelkammern bietet der High-Pressure (HP)-Aufsatz ein leistungsstärkeres, gebündeltes Spraybild und eignet sich optimal für die Reinigung und Untersuchung von tiefen Parodontaltaschen. Er ist 30 mm kürzer als der Originalaufsatz und bietet sich gut für den Einsatz bei jungen Patienten und das Arbeiten nahe der Behandlungsstelle an. Die kürzere Länge ist ähnlich wie bei herkömmlichen dampfsterilisierbaren Aufsätzen und erleichtert somit den Wechsel zu Einwegaufsätzen.

03. Funktioniert diese Spitze auf meiner Spritze?

Wir haben eine Reihe von Konvertern, die zu vielen Spritzen passen.


04. Kann ich mir wirklich sicher sein, dass mit Crystal Tip® eine genaue Trennung von Luft und Wasser gewährleistet ist?

Wenn Ihre technische Ausstattung voll funktionsfähig ist, garantieren wir eine 100%ige Trennung von Luft und Wasser. Durch die O-Ring-Arretierung sitzt der Crystal Tip® Aufsatz fest auf der Spritze. Außerdem können Sie dank des durchsichtigen Außenschafts der Crystal Tip® leicht erkennen, ob Wasser in die Luftkammer eingedrungen ist. Leckageprobleme sind zu 99 % auf verschlissene O-Ringe, unsachgemäße Montage des Aufsatzes oder die Anwendung des Aufsatzes mit einem nicht kompatiblen Adapter zurückzuführen.



Crystal Tip® Grundfunktionen

- Einwegnutzung verhindert Kreuzkontamination
- Sofortige trockene Luft und keine Lecks
- Schmales und ergonomisches Design bieten bessere Sicht im Mundraum
- O-Ring-Nut verhindert mögliche Luft-Wasser-Kontamination in den Luftkanälen
- Einfache Installation
- Kann in Form gebogen werden, ohne den Luft-/Wasserfluss zu beeinträchtigen, und ist leakagefrei
- Große Auswahl an Konvertern für die meisten Spritzen
- Verfügbar in verschiedenen Farben
- FDA geprüft

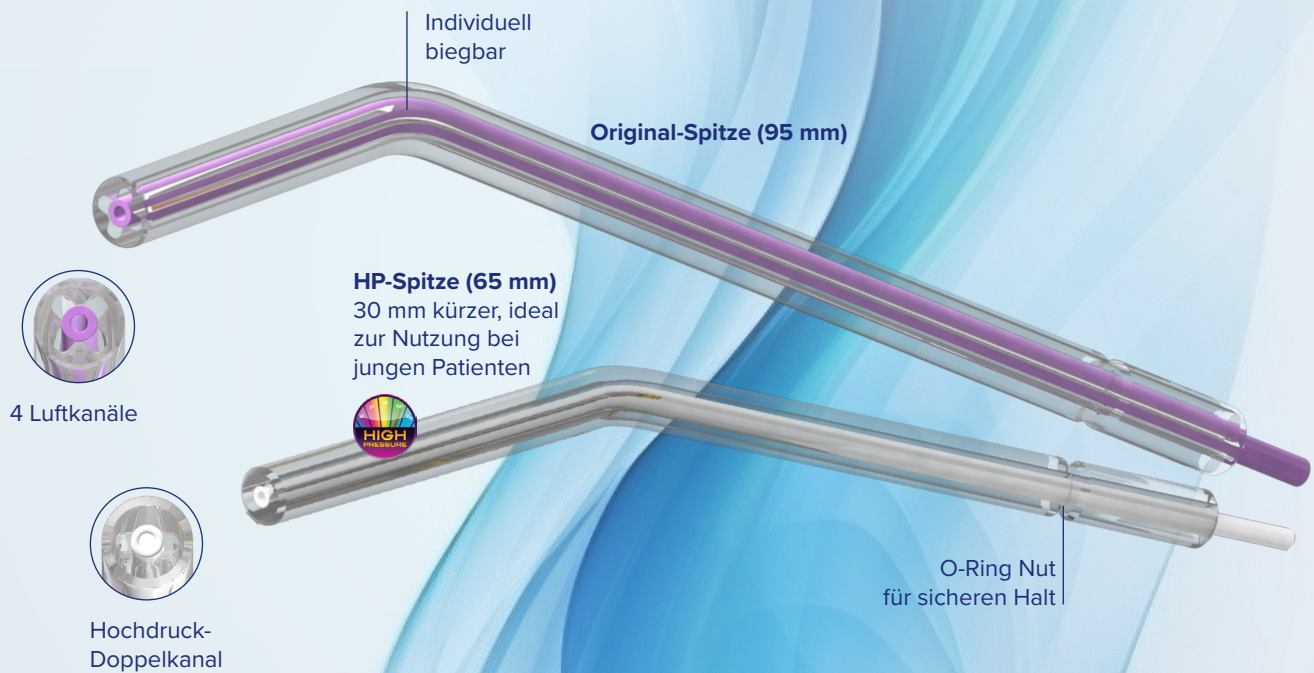

Jetzt Wechsel zu Crystal Tip® starten!

Ihr Wechsel zu Crystal Tip® ist einfacher als Sie glauben!

Wählen Sie das Modell Ihrer Luft/Wasser-Spritze und finden Sie den für Sie passenden Adapter sowie das zugehörige O-Ring Kit, um Ihr Spritzensystem auf Crystal Tip® umzurüsten.

YIE-D-CT/0725