




Tout simplement efficace.

Crystal Tip® – Embouts à usage unique pour seringues air/eau

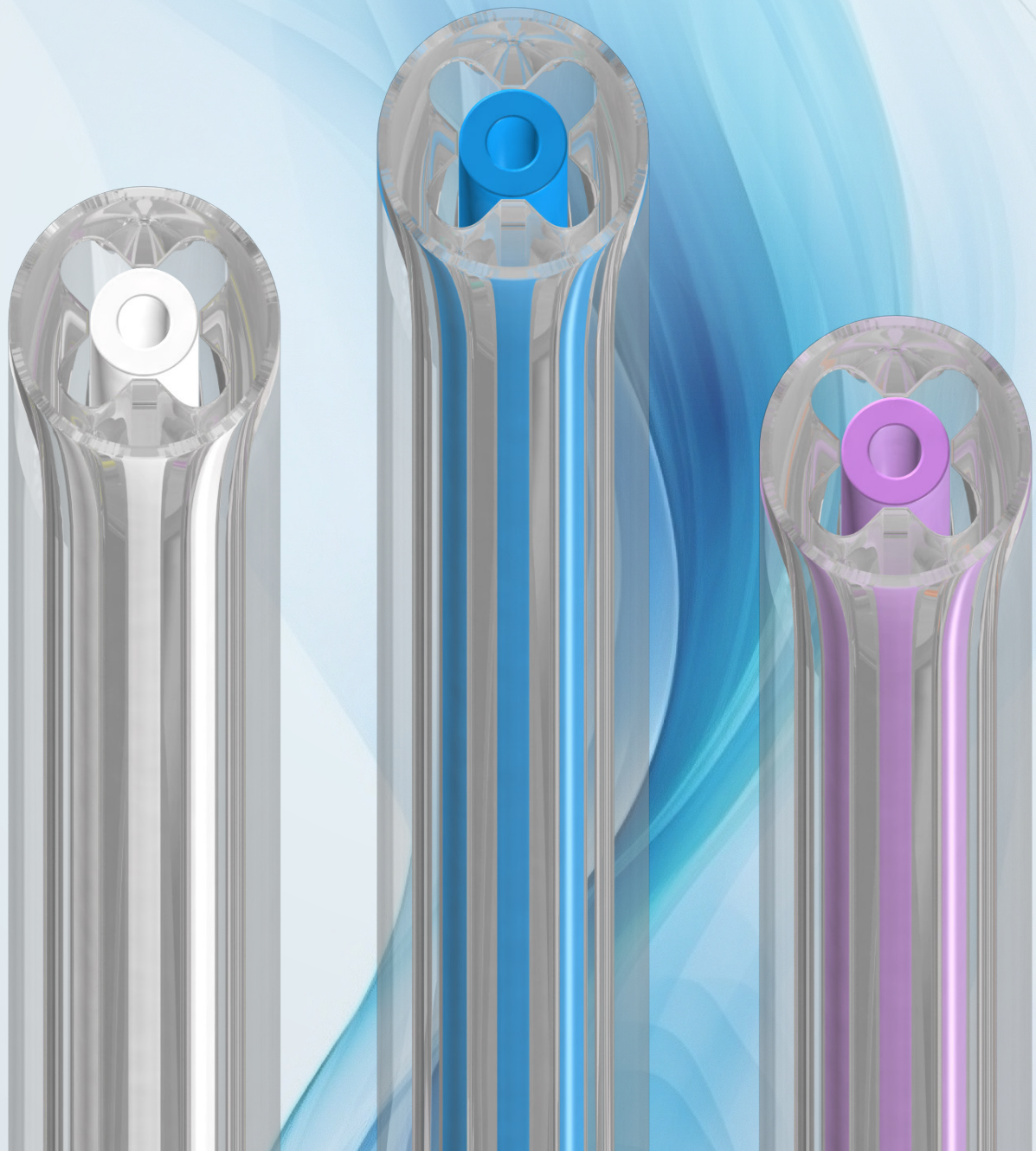



Nous vous accompagnons dans l'identification correcte de vos seringues, nous vous envoyons un échantillon d'essai et réalisons une comparaison personnalisée entre Crystal Tip et les produits concurrents, pour vous fournir – si nécessaire – le kit de conversion adapté. Notre objectif : vous rendre la transition aussi simple que possible.

*Voir le code QR au verso de ce dépliant.

			
Kit de conversion Cefla Anthos F3/F6 QRNT1030	Kit de conversion Cefla SP QRNT1035	Kit de conversion Faro SM03 QRNT1100	Kit de conversion Kavo Estetica QRNT1092
			
Kit de conversion Kavo K4 QRNT1090	Kit de conversion Luzzani Minibright QRNT1055	Kit de conversion Luzzani Minilight QRNT1050	Kit de conversion Luzzani Minimate QRNT1051
			Les références concernent uniquement les adaptateurs Crystal Tip®
Kit de conversion Quick Release ADEC/UNIC QRNT1000	Kit de conversion Sirona Sprayvit 4000 QRNT1071	Kit de conversion Sirona Sprayvit C8 QRNT1070	

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus posées concernant Crystal Tip. Notre objectif est de vous fournir rapidement et clairement toutes les informations essentielles. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Notre équipe se tient à votre disposition.

01. Quelle est l'avantage de la technologie „Quad Air Core“ ?

Les quatre chambres à air assurent une pression et pulvérisation modérées. Cela rend l'embout particulièrement adapté au séchage des adhésifs, Sealants, etc. L'embout original (Quad Air Core) offre également un bon accès à la zone des molaires postérieures. La version longue (95 mm) est flexible et peut être courbée pour les zones difficiles d'accès buccales ou linguales.

02. Qu'est-ce qui rend l'embout HP spécial ?

Avec une longueur de 65 mm et une double chambre, l'embout High-Pressure (HP) génère un jet plus puissant et concentré et donc idéal pour le nettoyage ainsi que l'examen de proches parodontales profondes. Il est 30 mm plus court que l'embout original, ce qui le rend parfait pour travailler à proximité du site de traitement et pour une utilisation chez les jeunes patients. La longueur réduite est comparable à celle des embouts autoclavables traditionnels, ce qui facilite la transition vers les embouts à usage unique.

03. Est-ce que cet embout est compatible avec ma seringue ?

Nous proposons une gamme d'adaptateurs compatibles avec de nombreux modèles de seringues.


04. Puis-je vraiment être sûr qu'avec Crystal Tip, la séparation d'air et d'eau est parfaitement assurée ?

Oui - à condition que votre équipement technique soit en bon état de fonctionnement, nous garantissons une séparation à 100% de l'air et de l'eau. Grâce au système de verrouillage par joint torique (O-Ring), l'embout Crystal Tip est solidement fixé à la seringue. De plus, l'embout transparent permet de voir immédiatement si de l'eau a pénétré dans la chambre d'air. Les fuites sont dans 99% des cas dues à des joints toriques usés, un montage incorrect de l'embout ou encore l'utilisation d'un adaptateur non compatible.



Fonctions de base de Crystal Tip®

- Utilisation à usage unique pour éviter toute contamination croisée
- Air sec immédiat, sans fuite
- Design fin et ergonomique pour une meilleure visibilité dans la cavité buccale
- La rainure pour joint torique évite toute contamination air-eau dans les canaux d'air
- Installation facile
- Peut être courbé sans compromettre le flux d'air/eau et reste étanche
- Large choix d'adaptateurs pour la plupart des seringues
- Disponible en plusieurs couleurs
- Conforme aux exigences de la FDA

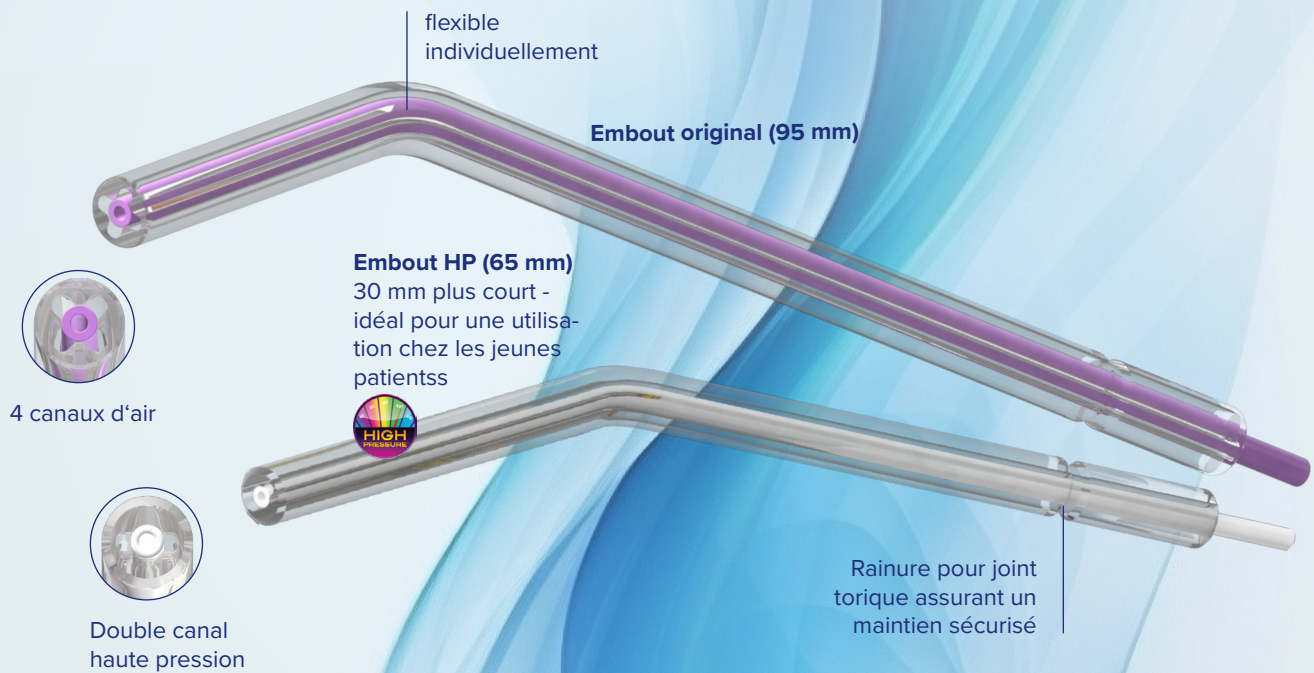

← Adoptez Crystal Tip®
dès maintenant !

Adoptez Crystal Tip® est plus simple que vous ne le pensez !

Sélectionnez le modèle de votre seringue air/eau, puis trouvez l'adaptateur et le kit de joints toriques compatibles pour passer au système Crystal Tip®.

YIE-FR-CT/0725